

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

*2024年5月改訂(第2版)
2023年4月作成(第1版)

認証番号:304ADBZX00111000

医療用品 4 整形用品
管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDNコード71025000

ヒビクアパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法 再使用禁止
2. 適用対象 (次の部位には使用しないでください)
 - (1)感染がみられる傷 (発赤、膿の滲出、発熱、はれ、悪臭などの異常が認められる傷)
[感染を悪化させるおそれがあります]
 - (2)次のような傷[感染を起こすおそれがあります]
 - 1) 深いさし傷や、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷
 - 2) ガラス・木片・砂・ほこり・衣類の繊維などの異物が入り込んだ傷
 - 3) 動物などに咬まれた傷
 - 4) 怪我をしてから時間がたった傷及びかさぶたがすでにできている傷

【形状・構造及び原理等】


本品は上面を薄いウレタンフィルムで覆ったハイドロコロイドと剥離紙から構成され、滅菌包装されています。

本品は創傷からの体液 (滲出液) を吸収・保持し、その部分がゲル状に白くふくらみ、治癒に適した湿潤環境を整えます。

体液は細胞の成長や再生を促す因子 = 「傷を治す成分」を含み、傷の治癒に重要な役割を果たしています。

注: 本品は体液や水分を吸収すると色が白く変わってふくらみますが製品の異常ではありません。また、本品を貼付した部分が発汗した場合、水分を吸収してハイドロコロイドが白くなることがあります。

ハイドロコロイド <イメージ図>

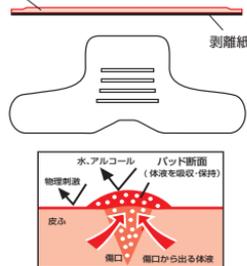

【使用目的又は効果】

ひび、あかぎれ、軽度のきり傷、すり傷、さし傷、かき傷、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度のやけどの「保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「痛み軽減」


【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 次の場合には使用しないでください
 - (1) にきび、しっしん、虫さされ、皮膚炎などの症状及びそれらをかきむしった傷、かさぶたができています。 ※症状や傷の悪化、発熱、治癒の遅れのおそれがあります。
 - (2) 目の周辺や粘膜。 ※はがすときに組織を傷つけるおそれがあります。
 - (3) **2才以下の乳幼児には使用しないでください。** ※皮ふが薄くやわらかいため、皮ふを傷つけるおそれがあります。
 - (4) 授乳傷には使用しないでください。 ※乳児が誤飲するおそれがあります。
2. 次の人は本品使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
 - (2) 絆創膏などによりかぶれやすい人、アレルギー体質の人。
 - (3) 強い倦怠感を感じたり、発熱を感じたりするなど全身の状態がよくない人。
3. 次の場合は直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください
 - (1) 本品の使用により傷の悪化、化膿、感染 (発赤、膿の滲出、発熱、はれ、悪臭などの異常が認められる傷)、傷の治りが悪いなどの症状があらわれた場合。
 - (2) 数日間使用しても傷の治癒や改善がみられない場合又は悪化した場合。
 - (3) 本品の使用により発疹、発赤、かゆみ、かぶれなどを生じた場合。
4. 本品を口にいけないでください ※誤飲のおそれがあります。
5. 3才以上の幼児・小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
6. ハイドロコロイドが体液 (滲出液) を吸収しきれない状態が続くと、ふやけを起こす場合がありますので、すみやかに新しいものに貼り替えてください
- * 7. 出血を伴うやけど、患部が白や黒に変色し、感覚がない重度のやけどの可能性のある傷に対しては、安全性・有効性が確認されていないので、使用しないでください
8. 本品は強いこすれや、過度の発汗、運動によるすき間の発生、水仕事、入浴又はプールなどで皮ふがふやけた場合にはかかれやすくなる場合があります
9. 患部の状態や個人の体質によっては、治癒後色素沈着や傷跡が残る場合があります
10. 製品にくぼみやムラがみられることがありますが、製造過程で生じるもので品質上問題ありません
11. 茶色っぽい小さな点は原料由来のもので品質上問題ありません

【使用方法等】

本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、使用方法を確認して正しく使用してください。

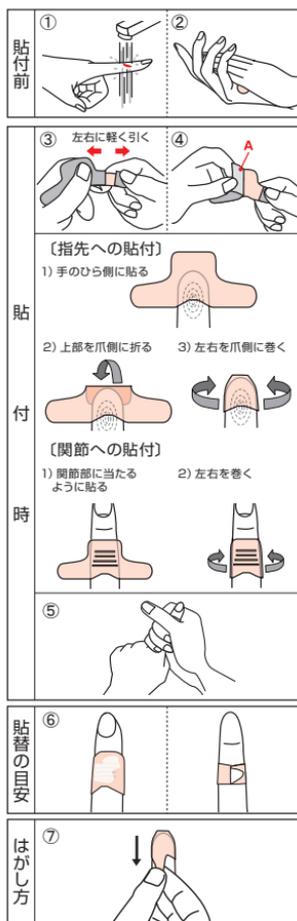

- ① 貼付前に適用部位の止血を行い、傷口の確認を行ってください。
※感染(発赤、膿の滲出、発熱、はれ、悪臭など)が認められる場合は使用しないでください。
※貼付前に傷及びその周囲の皮ふを水道水でよく洗い、水気を拭き取って清潔にしてください。
- ② **※ひび、あかぎれ、傷に塗布する軟膏・クリームなどを本品と併用しないでください。** 使用した場合は、水道水で残さないようによく洗ってください。
- ③ **※本品を両手で約1分温めてください。** 皮ふへのなじみがよくなります。
※本品より大きな傷に使用しないでください。
※包装に破損又は汚損が認められたときは使用しないでください。
※個包装開封後は、直ちに使用してください。
- ④ 剥離紙を上面にし両手で持ち左右に軽く引っ張り、剥離紙を製品から浮かせるように押し上げてください。
- ⑤ 大きい剥離紙Aを粘着部分に触れないようにつかみ、ゆっくりとはがし左図のように貼ってください。
※本品を引っ張った状態で貼付しないでください。 皮ふ障害(発赤、発疹、かゆみ、水疱、表皮の剥離など)やはがれの原因となるおそれがあります。
※指に巻き付ける際にきつく巻かないように注意してください。
- ⑥ 本品の端をしっかりと皮ふに密着させ、全体をなじませるように本品の上から手のひらで約1分押さえて温めてください。
- ⑦ 体液の漏れやふやけに注意し、こまめな貼り替えをお願いします。
※貼付中は毎日患部の状態を観察し、感染のおそれがないか確認してください。感染のおそれがなく体液の漏れや本品のはがれがない場合は最長で5日間貼ることができます。
※本品の端まで白くなった場合や、本品が汚れたり、端がはがれたりした場合はすみやかに新しいものに貼り替えてください。
※貼付中に感染(発赤、膿の滲出、発熱、はれ、悪臭など)が認められる場合は直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。 膿は淡黄色でねばねばしており臭いがあります。
再生されたばかりの皮ふは傷つきやすいため患部の保護を推奨します。
- ⑧ **⑦ 本品を引き伸ばすように軽く端を回回が引っ張り、ゆっくりとはがしてください。** はがれにくい場合は、温水を皮ふと本品との間に流し込むようにするとはがれやすくなります。
※出血させたり、再生した皮ふを取り除いたりしないように注意してはがしてください。 貼り替えの際は、本品をはがした後に傷口を水道水でよく洗ってから新しいものに貼り替えて、傷口を清潔に保ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
2. 有効期間
 製造より3年間(自己認証による)
3. 使用期限
 - (1) ケース底面に記載(西暦年月/製造番号)
 - (2) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 新タック化成株式会社
 〒769-1504 香川県三豊市豊中町上高野4148番地

発売元 **muhi** 株式会社 池田模範堂
 富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 ☎ 076-472-0911
 【電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00】